

# Q'STRAINT INQLINE®



RESTRAINTS SHOULD NOT BE HELD AWAY FROM BODY BY WHEELCHAIR COMPONENTS.



## ! WAARSCHUWINGEN


- Dit is een beknopte handleiding die eerst moet worden gelezen en begrepen voordat dit beveiligingssysteem wordt gebruikt.
- J-haken moeten worden bevestigd aan een massief rolstoelframe (geen spaken, wielen of verplaatsbare onderdelen).
- Schouder- en heupgordel (we raden het gebruik van beide aan) **MOETEN** over de schouder en heup van de inzittende passeren gaan. Rolstoelcomponenten mogen geen obstructie vormen tussen de gordel en het lichaam van de inzittende.
- Overschrijd de maximum 500 lbs niet (226kg) gecombineerd gewichtslimiet van het mobiliteitshulpmiddel en de passagier.

## ROLSTOEL BEVESTIGEN



1

Rolstoel achter oprijplaat, blokkeer de remmen of schakel de stoel uit.

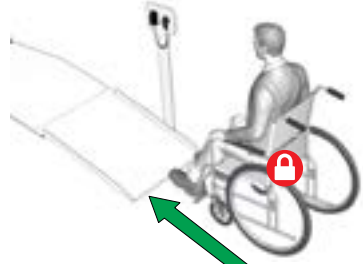


2

Houd beide knoppen ingedrukt (4 sec) om oprolmechanismen vrij te geven.




3

Bevestig de J-haken voor, aan het massieve frame (30 sec), geef de remmen vrij en schakel de stoel uit.

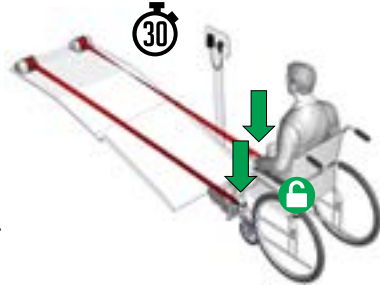


4

Houdt de Z-knop ingedrukt; duw de duim controller naar boven om de rolstoel **VOORZICHTIG**, op de oprijplaat te brengen, dan links of rechts om de richting van de rolstoel aan te passen.

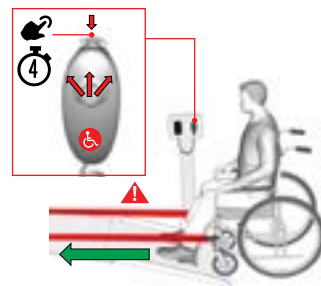

5

Maak de Z-knop los en plaats deze in de opslag. Bevestig oprolmechanismen aan de achterkant en J-haken aan het rolstoelframe. Houd de vergrendelknop (3 sec) ingedrukt om de oprolmechanismen te vergrendelen.

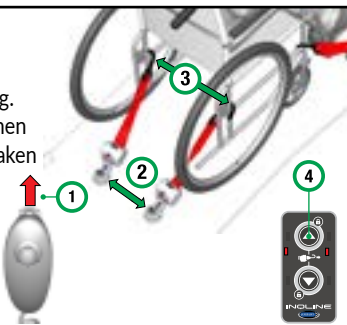

## PASSAGIER BEVESTIGEN




6

Bevestig de heupgordel aan de retractorpen. (dezelfde kant als de ankerplaats voor de schouderriem).



7

Bevestig de bekkengordel aan de pen van het oprolmechanisme en plaats de riem tussen het wiel en de rolstoel.

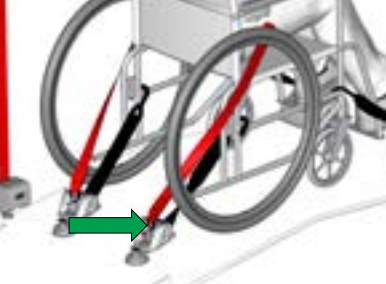


8

Plaats de schoudergordel over de schouder en borst van de inzittende.



9

Gesp de heupgordel vast aan de bekkengordel (op de heup) en pas de lengte van de riem aan.

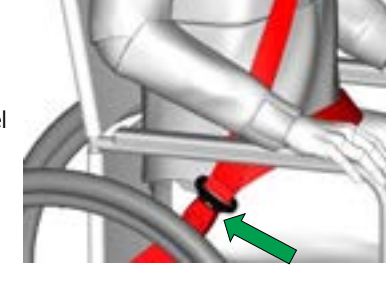

10

Vergrendel remmen en schakel de stoel uit, klaar voor transport.




## PASSAGIER LOSMAKEN




11

Schouderriem losmaken van de bekkengordel.

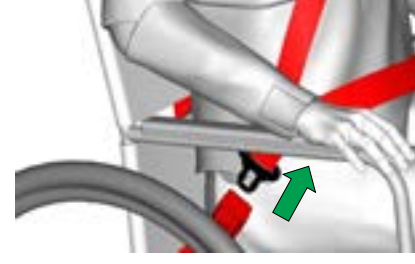


12

Laat de schoudergordel voorzichtig in de opbergruimte terugtrollen.

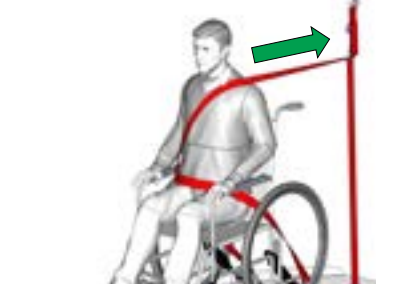

13

Maak de bekkengordel los van de pen van het oprolmechanisme en leg de riem in de opberging.

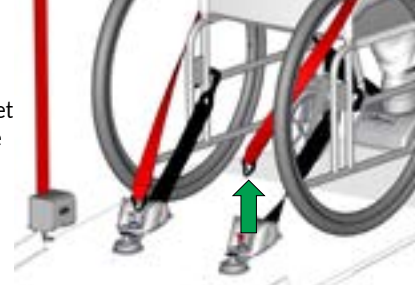


14

Maak de heupgordel los van de pen van het oprolmechanisme en plaats de riem in de opslag.



15

Bevestig de heupgordel aan de schouderriem-pen om deze in de opslag te plaatsen.

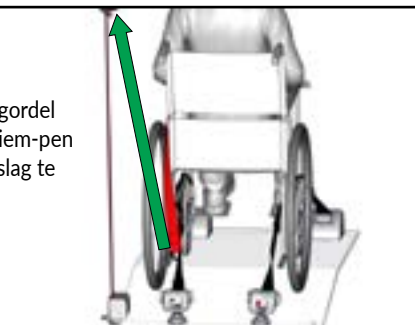

## ROLSTOEL LOSMAKEN




16

Maak de remmen los en schakel de stoel uit.




17

Houd de ontgrendelknop ingedrukt (4 sec) om de oprolmechanismen te ontgrendelen. Druk op hendels en verwijder de achterste J-haken. Verwijder de oprolmechanismen van de vloer en plaats ze in de opslag.

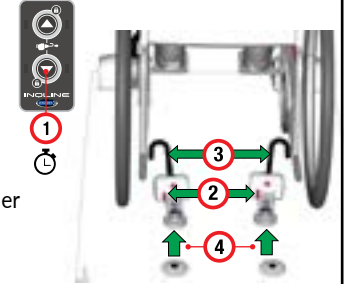


18

Houdt de Z-knop ingedrukt; duw de duim controller naar beneden om de rolstoel **VOORZICHTIG**, van de oprijplaat te bewegen, dan links of rechts om de richting van de rolstoel aan te passen.

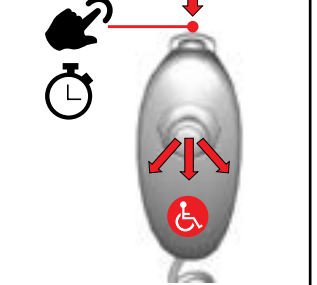

19

Maak de Z-knop los en plaats deze in de opslag. Houd beide knoppen (4 sec) ingedrukt om de oprolmechanismen te ontgrendelen. Vergrendel remmen en schakel de stoel uit.

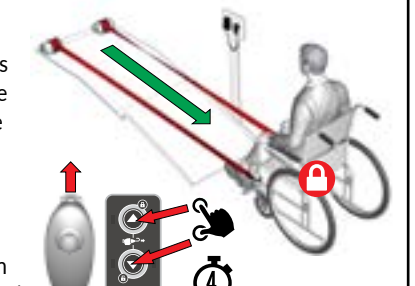

20

Berg de J-haken op, laat de remmen los of zet de stoel aan. Plaats de rolstoel in een veilige ruimte.

