


Gebruiksaanwijzing

INQLINE®

ROLSTOELVASTZET SYSTEEM MET GEÏNTEGREERDE LIER

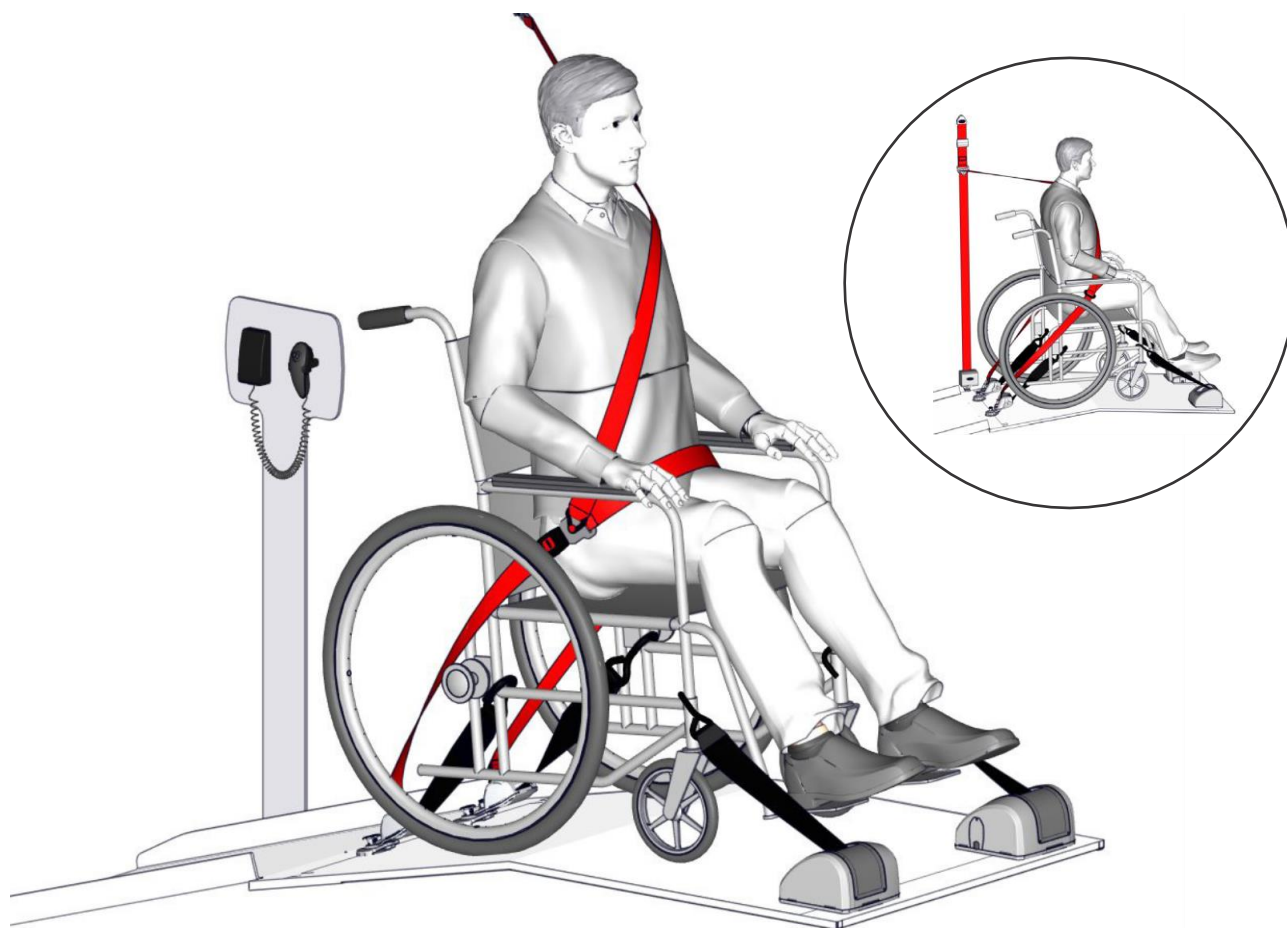

DIT AAN DE ACHTERZIJDE IN TE RIJDEN GEÏNTEGREERDE ROLSTOELVASTZET SYSTEEM EN ONDERDELEN VOLDOEN AAN A;;E VAN TOEPASSING ZIJNDE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN EN REGELGEVING WAARONDER; ADA, FMVSS & CMVSS 209/302, EN CSA Z605. ALS AANVULLING, ALLE SYSTEMEN ZIJN GETEST OP BOTSPOEVEN VAN 48 KM/H, 20G, EN VOLDOEN AAN RESNA WC-4, SECTIE 18 EN ISO-10542-1.

INQLINE®

INHOUDSOPGAVE

BELANGRIJKE INSTALLATIE EISEN.....	4
BELANGRIJKE AANWIJZIGEN EN WAARSCHUWINGEN	5
INTRODUCTIE	6
REGELGEVING	6
ELEKTRISCHE VEREISDEN	7
SYSTEEM DEFINITIES	7-9
GEBRUIKSVOLGORDE	10
GEBRUIKS INSTRUCTIES	11-16
NOODONTGREDELING.....	17-20
PROBLEEMOPLOSSEN	20-23
ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN.....	24
GARANTIEVOORWAARDEN.....	25

- Lees, begrijp en volg altijd de instructies en waarschuwingen in deze handleiding. Neem contact op met het dichtstbijzijnde Q'STRAIT®-kantoor voor vragen over de installatie, bediening, probleemoplossing, onderhoud of algemeen onderhoud van het INQLINE™ Integrated Winch & Retractor Securement System (hierna INQLINE™ -systeem genoemd).
- Deze handleiding biedt een instructie voor de installatie van het INQLINE™ -systeem. Verander, wijzig, verwissel of vervang GEEN van de Q'STRAIT®-componenten, aangezien het INQLINE™ -systeem en alle gerelateerde componenten ontworpen en getest zijn om te werken als een samenhangend systeem en MOET geschikt zijn voor uw specifieke toepassing. Elke afwijking, wijzigingen of onjuiste installatie van het INQLINE™ -systeem kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- Alle apparatuur en componenten **MOETEN** worden geïnstalleerd en onderhouden door een ervaren en opgeleide technicus. We raden het gebruik van een veiligheidsbril en andere maatregelen ter voorkoming van letsel aan, wanneer u dit systeem installeert of onderhoudt.
- Inspecteer en controleer de onderkant van de voertuigvloer, aansluitingen, frames, dwarsliggers, brandstoftanks en andere mogelijke obstakels die de juiste installatie van het INQLINE™ -systeem kunnen beïnvloeden. Installeer **GEEN** verankeringen of andere systeemcomponenten in defecte of niet-duurzame materialen zoals gecorrodeerde metalen, houten, plastic of glasvezelpanelen. Het INQLINE™ -systeem en voertuigankers kunnen extra versteviging vereisen. De installateur is ervoor verantwoordelijk dat verankeringen worden geïnstalleerd in een structuur die voldoet aan de toepasselijke voorschriften, normen en prestatie-eisen.
- Probeer **NOOIT** het INQLINE™ -systeem of een van zijn componenten te repareren of aan te passen. Gebruik **ALLEEN** Q'STRAIT®-componenten bij dit systeem, tenzij anders vermeld. Combineer **GEEN** onderdelen en componenten van andere fabrikanten en gebruik het systeem **NIET** als er onderdelen ontbreken, defect zijn of als de band is afgesneden, gerafeld, verbrand, gesmolten of geschuurd.
- Het INQLINE™ -systeem is dynamisch getest op ongevallen bij 30MPH (48Km/U), 20G in de naar voren gerichte richting met behulp van een Surrogaat Rolstoel (SWC) met een gewicht van 187LBS (85KG) tot 440LBS (200KG) en een 168LBS (76KG) antropomorf testapparaat (ATD). De ATD/Test Dummy wordt beveiligd met behulp van een goedgekeurd rolstoelinzittenden-vastzetsysteem met een schouder- en heupgordel.
- Het INQLINE™ -systeem is statisch getest (Winch Straight Line Pull) op een 16 ° gesimuleerde oprijplaat en een gecombineerde massa van 608LBS (276KG).
- De permanente sticker welke een verkorte handleiding is voor het juiste gebruik en de juiste werking van het INQLINE™ -systeem en, indien van toepassing, de handmatige ontgrendeling moeten op een zichtbare locatie dichtbij het geïnstalleerde apparaat worden geplaatst.
- Neem contact op met Q'STRAIT® als de afmetingen van het voertuig buiten de test of de aanbevolen installatie afmetingen vallen.



BELANGRIJKE AANWIJZIGEN EN WAARSCHUWINGEN

- Gebruik of gebruik dit product **NIET** voordat u alle instructies in de installatie- en gebruiks- en onderhoudshandleidingen hebt gelezen en volledig begrijpt. Laat alleen een GEKWALIFICEERD persoon, een persoon die goed is opgeleid in het beveiligen van mobiliteitshulpmiddelen en het positioneren van rolstoel vastzetsystemen, dit systeem installeren en gebruiken. Onjuist gebruik van het INQLINE TM -systeem kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- Gebruik dit product **ALLEEN** met de voorwaarts gerichte rolstoelen. Gebruik voor maximale veiligheid een rolstoelbevestigingssysteem en inzittenden vastzetsysteem dat voldoet aan ANSI / RESNA WC-4, paragraaf 18, CSA-Z605 of ISO 10542 en rolstoelen die voldoen aan ANSI / RESNA WC-4, sectie 19.
- Indien geïnstalleerd en gebruikt volgens deze instructies, zal het INQLINE TM -systeem resulteren in een verhoogde veiligheid en beveiliging voor inzittenden die aan een rolstoel zijn gebonden tijdens normale verplaatsingen, noodmanoeuvres en andere soorten incidenten. Vervang het INQLINE TM -systeem en zijn componenten na een voertuigincident of een plotselinge stop die de integriteit van het systeem kan hebben beschadigd.
- Als gevolg van variaties in rolstoelontwerpen, inzittende afmetingen en gewicht en laadhellingshoeken, kan extra apparatuur of bagage die wordt vervoerd op de rolstoel of inzittende een gevaarlijke situatie creëren voor de rolstoel en de inzittende om achteruit of zijwaarts te kantelen. We raden daarom aan dat alle extra uitrusting en bagage die de kans op kantelen kan vergroten, vóór gebruik uit de rolstoel of van de inzittende worden verwijderd. We raden ook aan om altijd een assistent te hebben wanneer de rolstoel het voertuig in gaat of uitstapt.
- Het INQLINE TM -systeem werkt alleen als het voertuig in de parkeerstand of op de handrem staat. Het systeem is ook uitgerust met een in de fabriek ingestelde Auto Stop-functie die ontworpen is om de rolstoel ongeveer 12 - 16 inch (300 - 400 mm) van de units af te houden. Aangezien elke rolstoel- en voertuiginstallatie verschilt, kan extra afstand nodig zijn om contact met de eenheden of het meubilair van het voertuig te voorkomen en de kans op letsel voor de inzittende te verkleinen. We raden aan om tijdens het in- en uitstappen zorgvuldig te kijken naar de plaatsing van de inzittende in het voertuig.
- Het INQLINE TM -systeem en de componenten ervan **MOETEN** voor elk gebruik regelmatig worden gereinigd, onderhouden en geïnspecteerd. **NIET** gebruiken als een van de componenten beschadigd is, kapot is gegaan, ontbreekt, defect is of als de riem is gesneden, gerafeld, verbrand, gesmolten of geschuurd.
- Bewaar de rolstoel- en de inzittendengordels (schouder- en heupgordels) altijd van de vloer wanneer u ze niet gebruikt met een geschikte opbergtas of -container. Laat de gordels niet verdraaid raken in de oprolmechanismen of in contact komen met scherpe hoeken en randen.
- De gordelhaken voor rolstoelbevestiging **MOETEN** worden bevestigd aan specifieke bevestigingspunten van de rolstoel of aan het frame van de rolstoel zoals beschreven in de handleiding Gebruik en onderhoud van de rolstoel. Bevestig de gordelhaken **NIET** aan de wielspaken van de rolstoel, de wielen of andere verwijderbare of niet-duurzame delen van de rolstoel. Zorg ervoor dat alle gordels van het rolstoel vastzetsysteem vergrendeld en goed gespannen zijn. Schud de rolstoel indien nodig heen en weer of gebruik handmatig de knoppen (indien beschikbaar) om de riemspeling te verwijderen.
- De inzittendenveiligheidsriemen (schouder- en heupgordels) moeten stevig over het bovenlichaam en het bekken van de bewoner passen. Raadpleeg de installatiehandleiding voor de juiste bevestiging, bevestiging en positionering van de heup- en schoudergordels voor inzittenden. Afwijkingen, veranderingen, slijtage, draaien, onjuiste passing aan het lichaam van de inzittende of interferentie met de rolstoelcomponenten kunnen de prestaties van het INQLINE TM -systeem negatief beïnvloeden en persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
- Een in het voertuig verankerde rugleuning moet worden voorzien als er een hoofdsteun aan het voertuig is gemonteerd. Dit is om de achterwaartse uitwijking van de rugleuning van de rolstoel te minimaliseren en vermindert de kans op persoonlijk nekletsel.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

INTRODUCTIE

ONTWORPEN OM TE PRESTEREN

Dit **Geïntegreerde Lier- en Retractor-Systeem**, ontworpen door onze ingenieurs, heeft een revolutie teweeggebracht in de industrie met zijn innovatieve ontwerp dat een rolstoelpassagier **automatisch** de hellingbaan op **stuurt**, zelfspanningen en beveiliging bij het **aanraken van een knop**. Hierdoor biedt het gemoedsrust en volledige controle over de in- en uitrijden van het mobiliteitshulpmiddel.

DUURZAAM GEBOUWD

Uitgerust met een energie absorberend stalen frame en heavy-duty precisie oprolmechanismen die de rolstoel sturen tijdens het op- en afrijden van de oprijplaat. Het zelfspannende, zeer sterke gordelsysteem minimaliseert achterwaartse beweging tijdens het laad- en losproces om ervoor te zorgen dat de rolstoelgebruiker altijd veilig wordt vastgezet.

VEILIG OP WEG

Het veilig vervoeren van rolstoelpassagiers is onze missie en om die reden zijn wij bij alle grote internationale veiligheidscommies betrokken, om zo te helpen bij het ontwikkelen en verbeteren van veiligheidsnormen voor rolstoelgebruikers en -inzittenden. Al onze systemen worden volgens de hoogste normen ontwikkeld en door crash- en duurzaamheidstesten te ondergaan in een wereldwijd gerenommeerde testfaciliteit voldoen ze niet alleen aan alle toepasselijke eisen en regelgeving, maar ze overtreffen deze standaarden zelfs.

REGELGEVING




Dit geïntegreerde systeem voor het achter in rijden van een voertuig en componenten voldoen aan alle toepasselijke delen van gerelateerde veiligheidsvoorschriften en -normen, waaronder ADA, FMVSS & CMVSS 209/302 en CSA Z605. Bovendien zijn alle systemen getest op botsingen bij 30 mph (48 km / u), 20 G, en voldoen ze volledig aan RESNA WC-4, Sectie 18 en ISO 10542-1.

ELEKTRISCHE VEREISDEN

Stroomvoorziening




- Alle apparatuur en componenten moeten worden geïnstalleerd en onderhouden door een ervaren en opgeleide technicus.
- Aansluiting 12V met een zekering van 30 ampère tussen de + aansluiting van batterij en controller.

SYSTEEM DEFINITIES

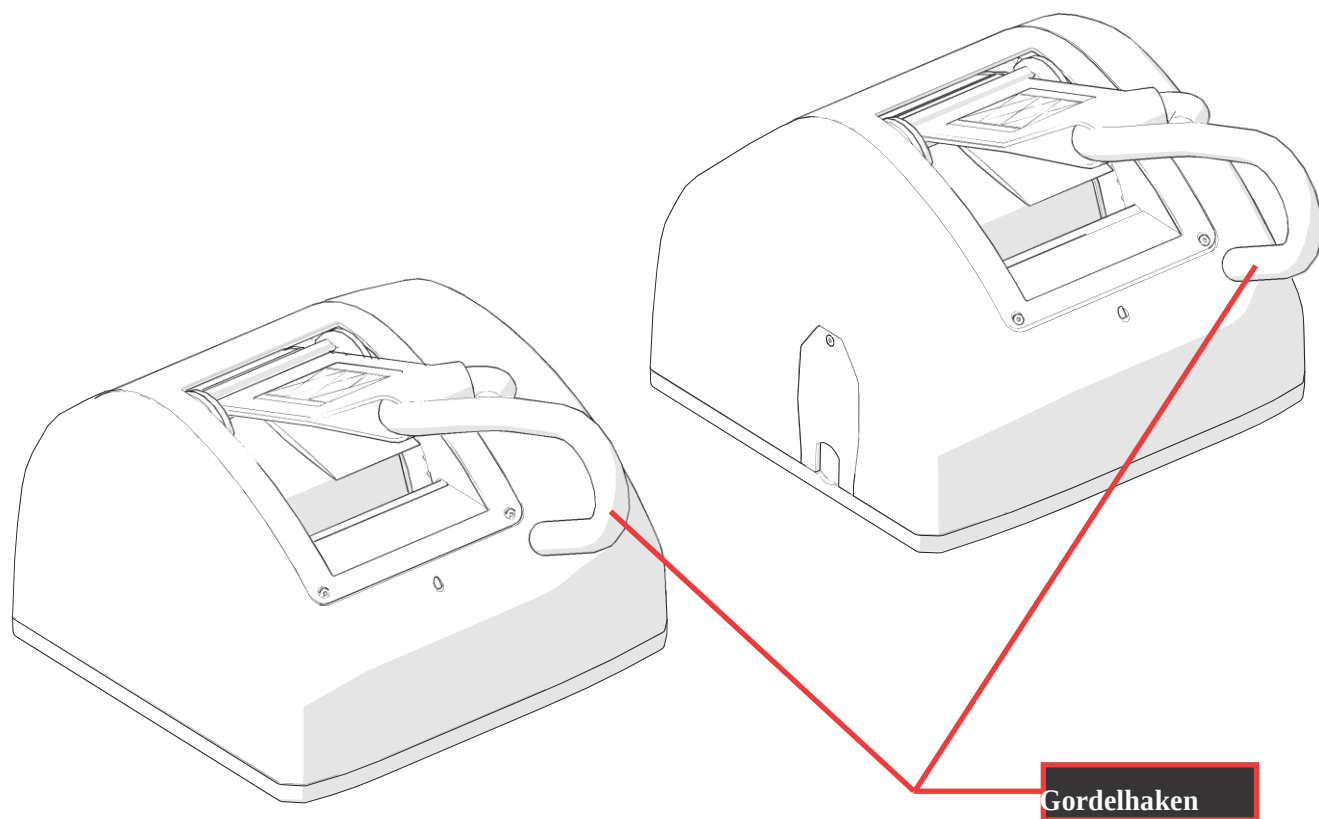


Voorste , Automatische Rechter en Linker INQLINE™ Retractoren

- Voeren automatisch de rolstoel het voertuig in en laten de rolstoel beheerst uit rijden.

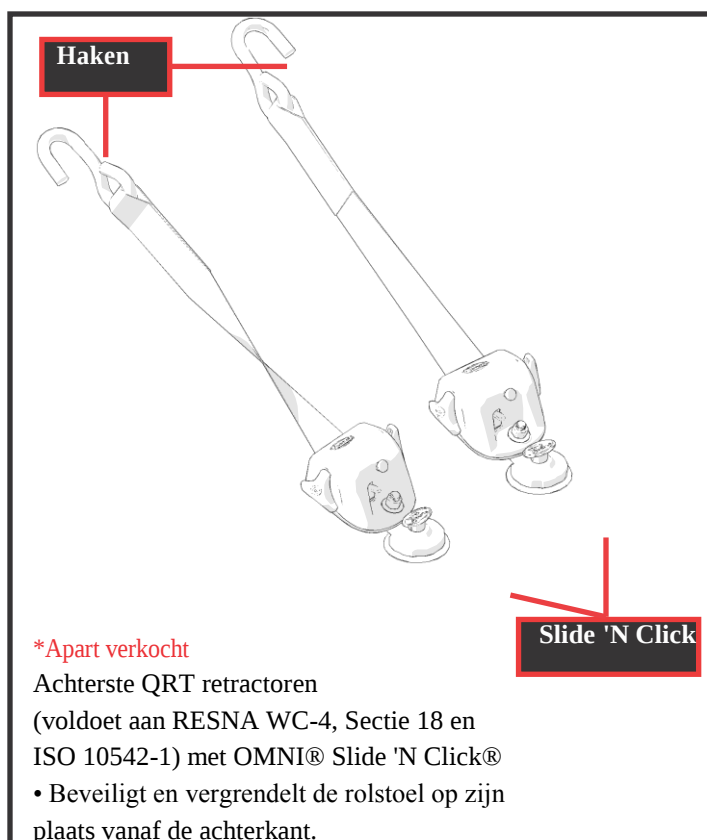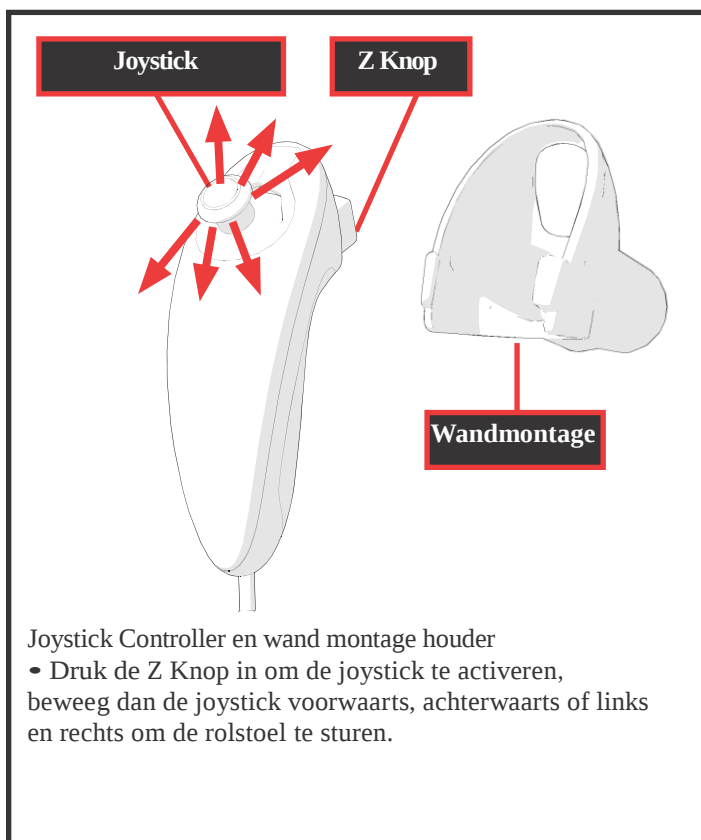
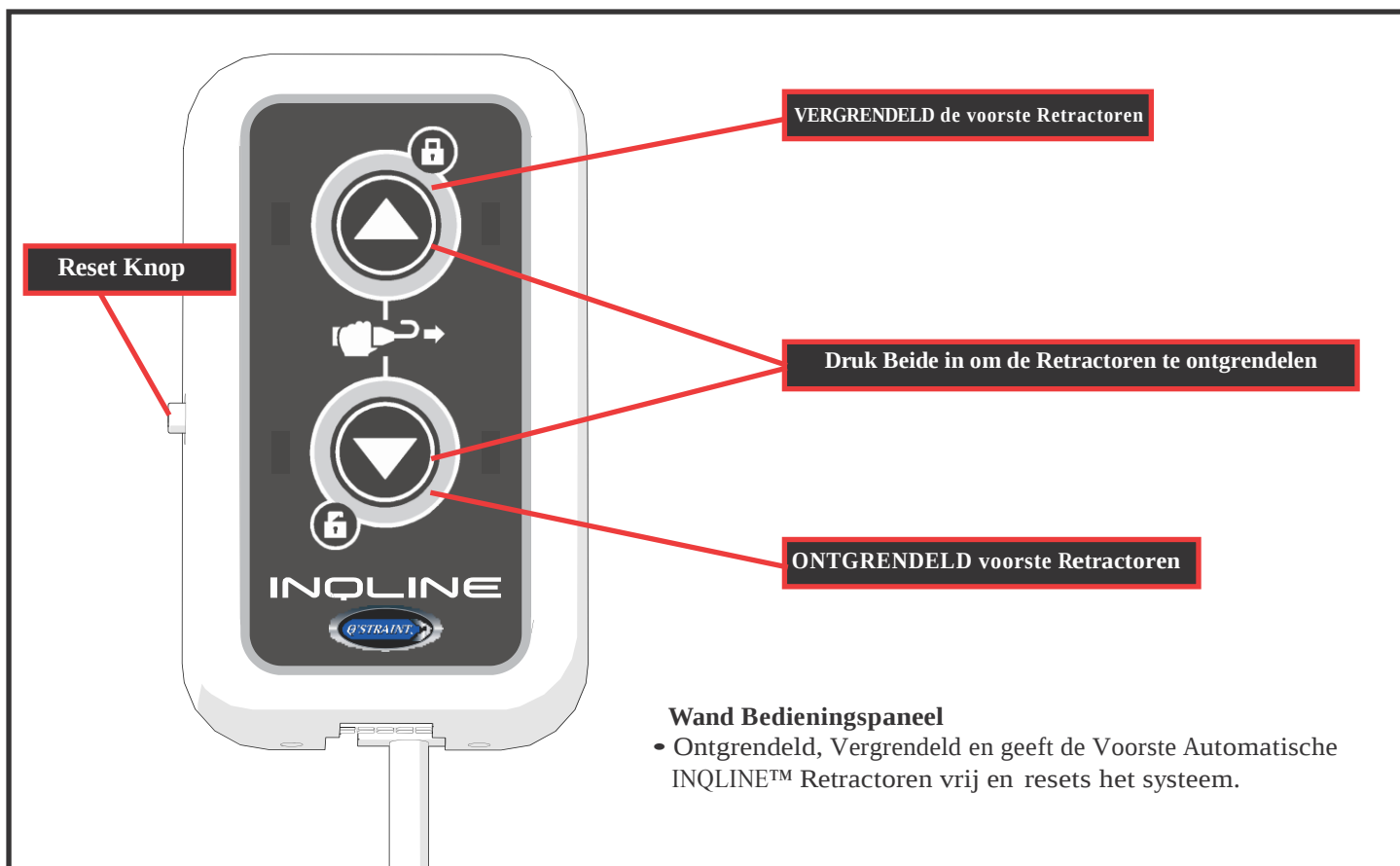


SYSTEEM DEFINITIES

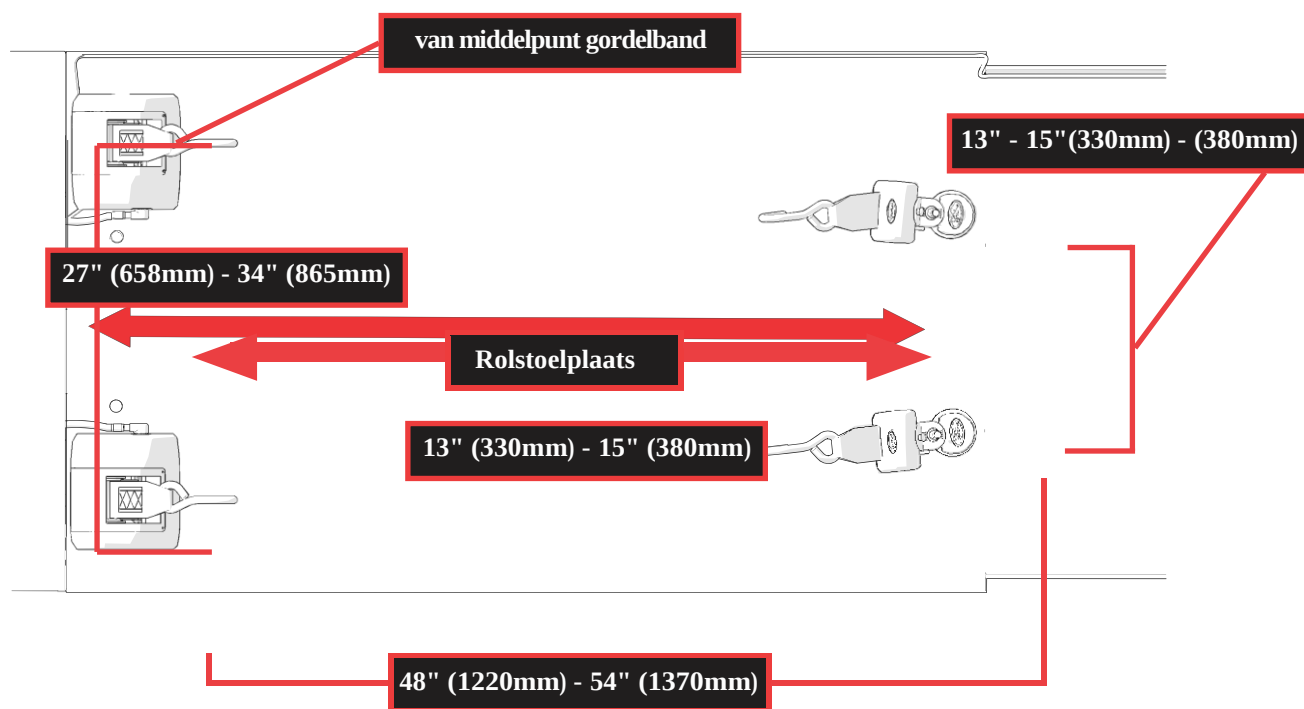

Rolstoelplaats

- Vastzetgebied voor de rolstoel, rolstoelinzittende.





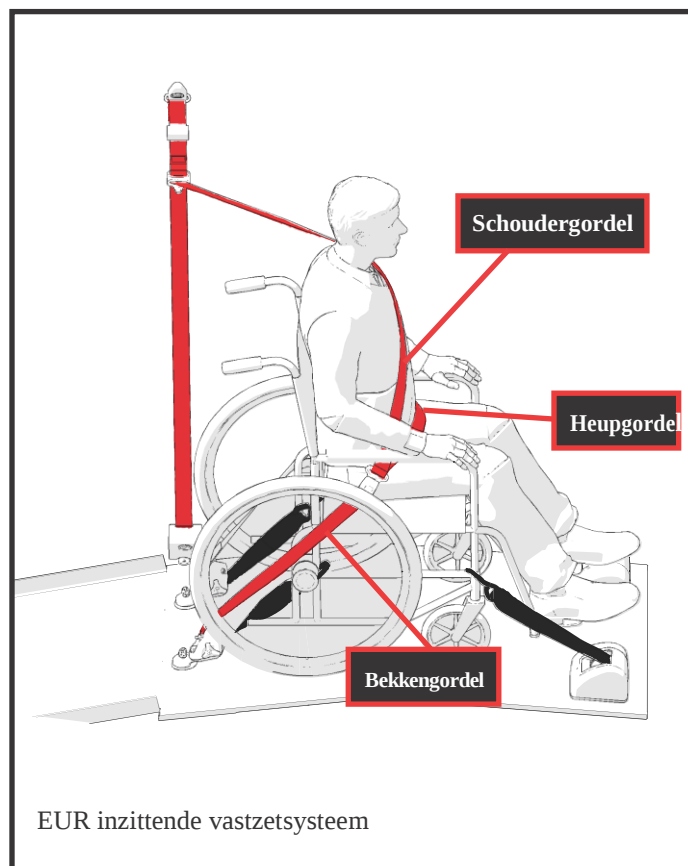
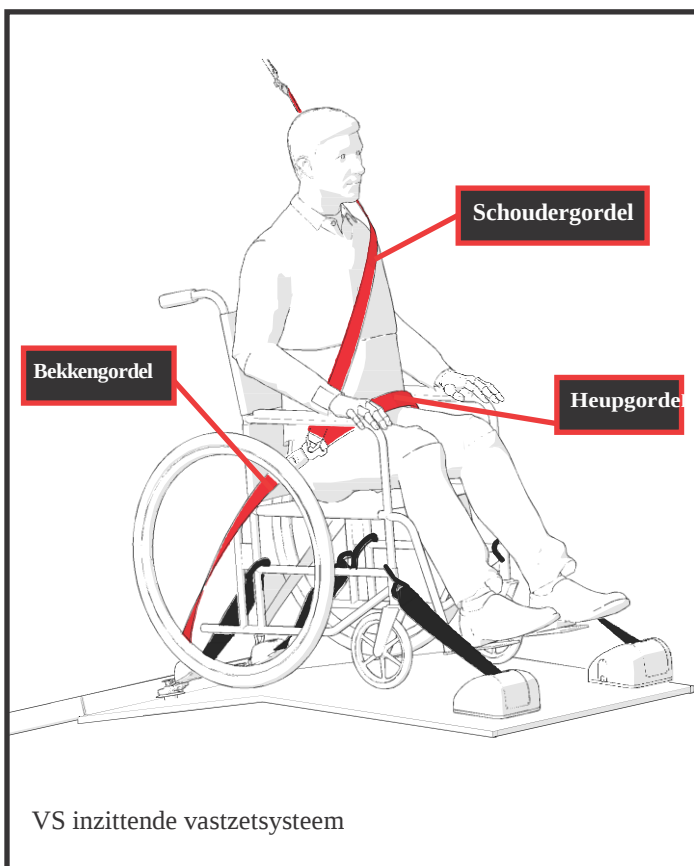


Het inzittendenbeveiligingssysteem kan afwijken van het afgebeelde model, afhankelijk van het voertuigmodel.

GEBRUIKSVOLGORDE

Hieronder volgt een korte handleiding over hoe het INQLINE™ Geïntegreerde Lier & Rolstoelvastzet Systeem werkt.


 Raadpleeg het hoofdstuk over de gebruiksaanwijzing in deze handleiding voor volledige instructies.

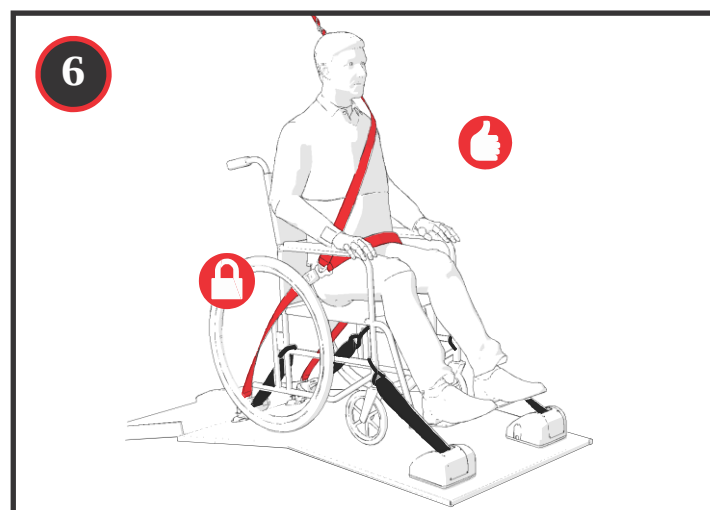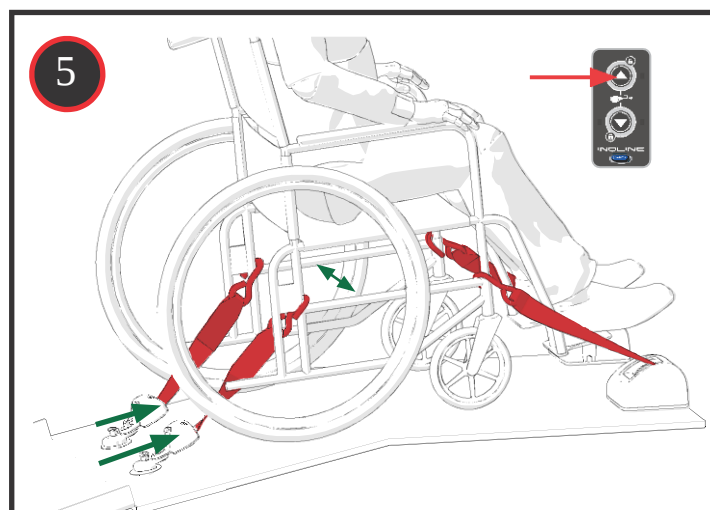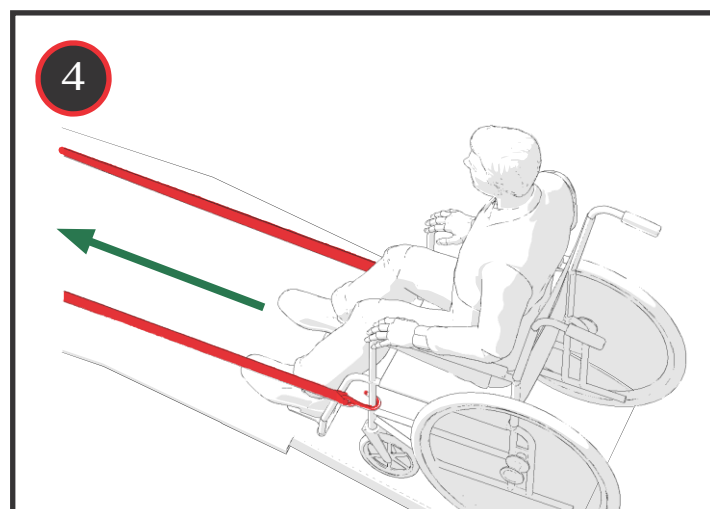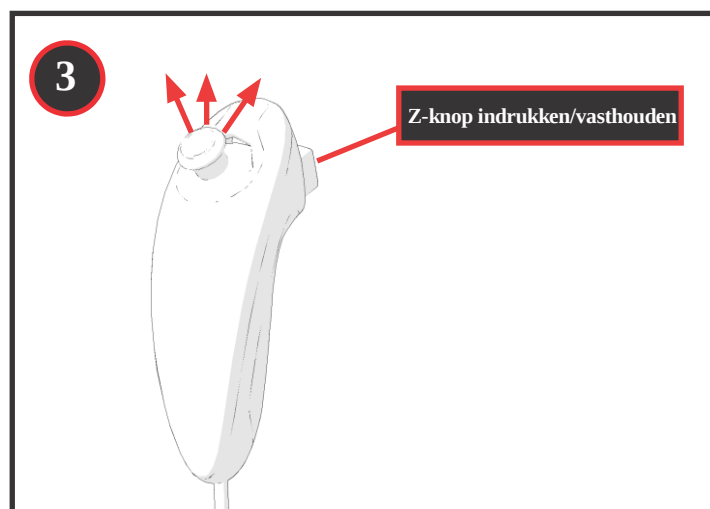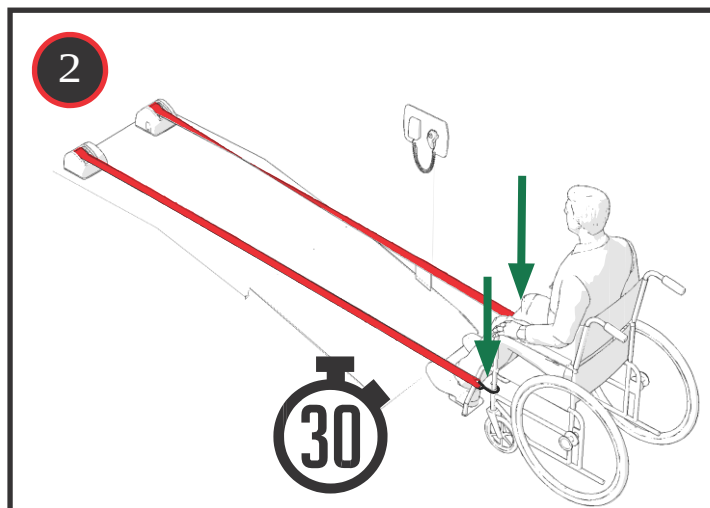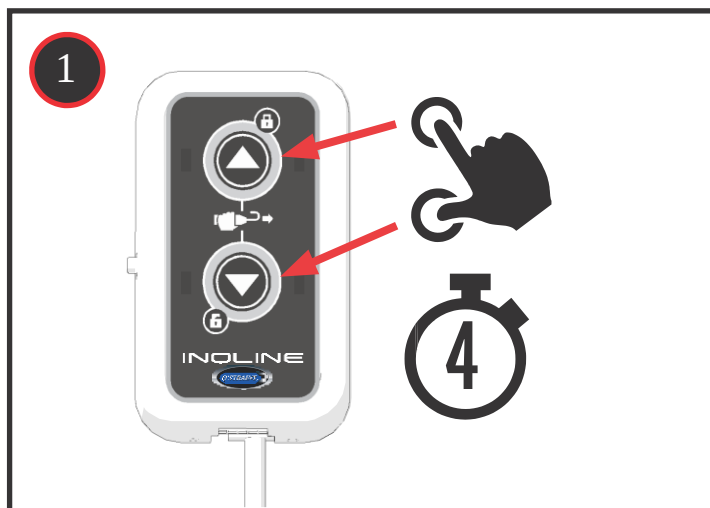




ROLSTOEL VASTZETTEN

1. Rolstoel achter de oprijplaat, blokkeer de remmen of schakel het contact uit (A).

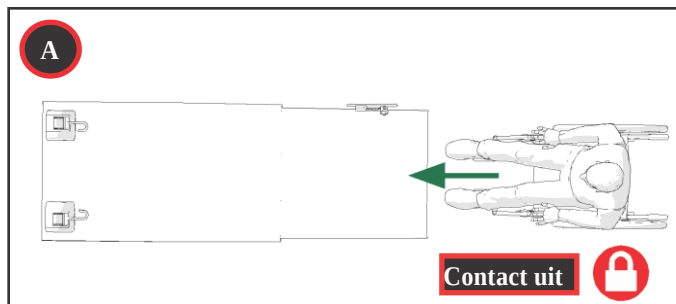


2. Druk beide knoppen in en houdt deze vast (4 sec.) Om de voorste INQLINE™ gordels te ontgrendelen (B).

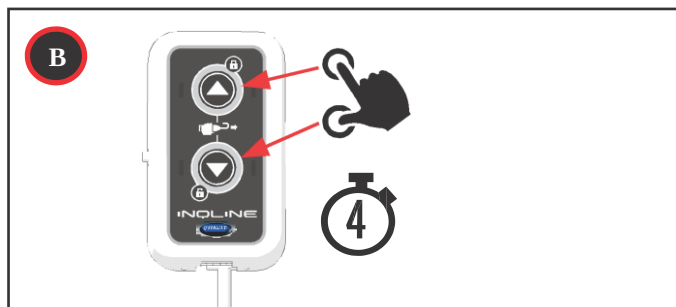


3. Bevestig de voorstel gordelhaken aan een stevig deel van het rolstoelframe (in 30 sec), ontgrendel de remmen en houdt het contact uitgeschakeld (C).




Als de voorste retractoren vergrendelen voordat de haken aan de rolstoel zijn bevestigd, herhaal dan stap 2 en ga dan verder.

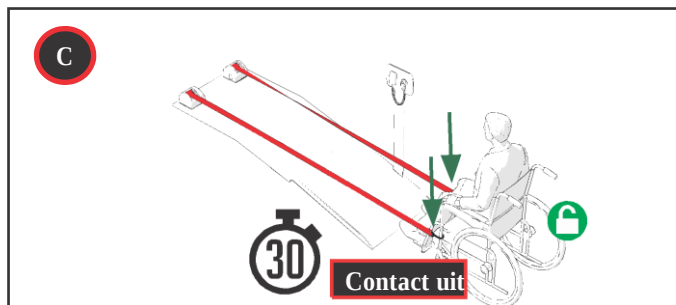

Gordelhaken moeten bevestigd worden aan een stevig deel van het rolstoelframe. (niet aan spaken, wielen of beweegbare delen) (D).

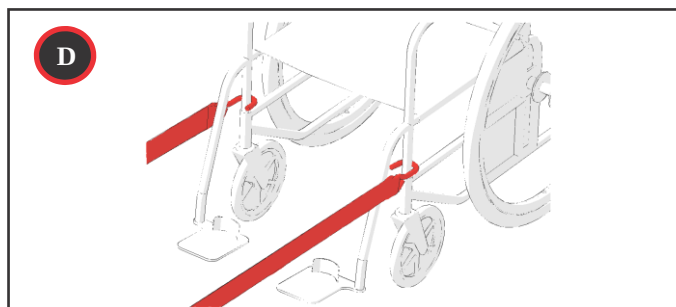

4. Druk de Z-knop in en houdt deze ingedrukt; druk de joystick naar voren om de rolstoel **VOORZICHTIG** op de oprijplaat te rijden. Dan naar links of rechts om de rolstoel te sturen (E).

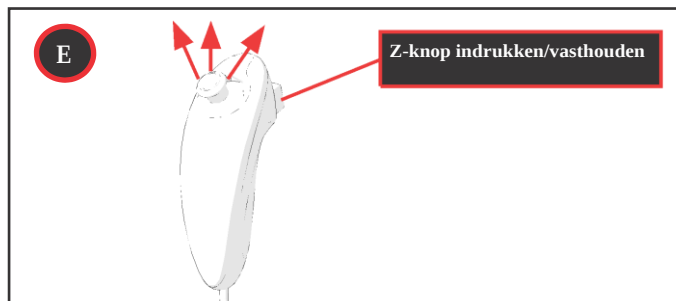




ROLSTOEL VASTZETTEN




Stuur **VOORZICHTIG** zodra de rolstoel op de oprijplaat is **(F)**.

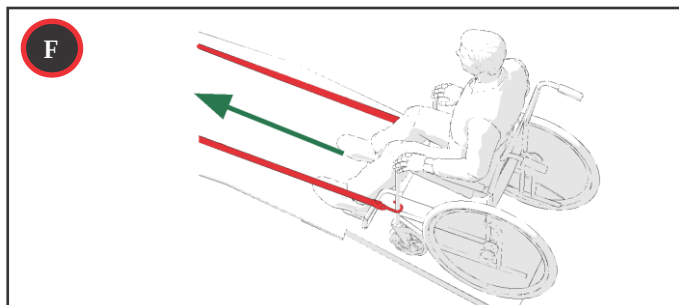


5. Plaats de rolstoel op de rolstoelplaats **(G)**.




Zorg ervoor dat er 10cm zit tussen de bestaande bevestigingspunten en de achterwielen van de rolstoel voor een correcte bevestiging.

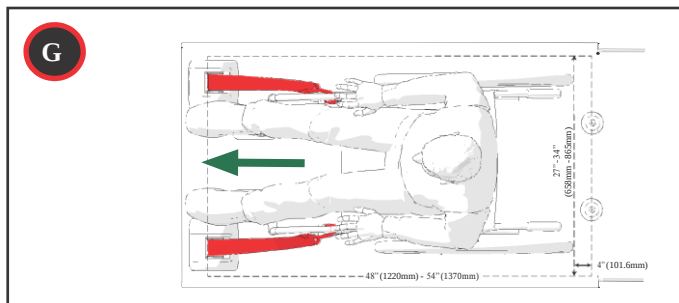


6. Laat de Z-knop los en berg de controller op in de wandhouder **(H)**.

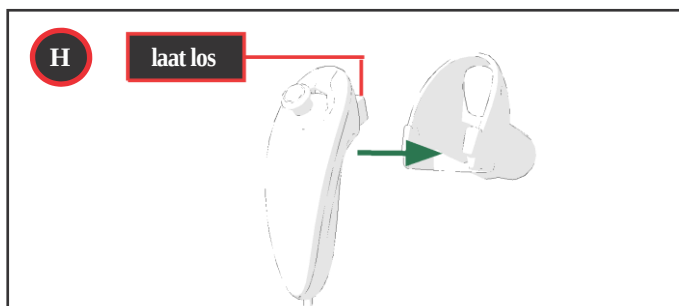

7. Bevestig de achterste gordelhaken aan een stevig deel van het rolstoelframe **(J)**.

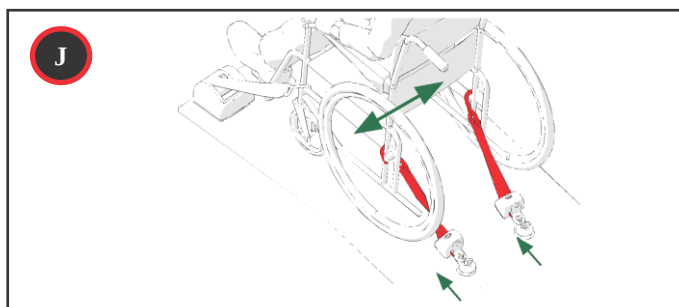


Gordelhaken moeten worden bevestigd aan een stevig deel van het rolstoelframe (geen spaken, wielen of beweegbare onderdelen) onder een hoek van ongeveer 45 graden met de vloer eenmaal in de Rolstoelplaats **(K)**.

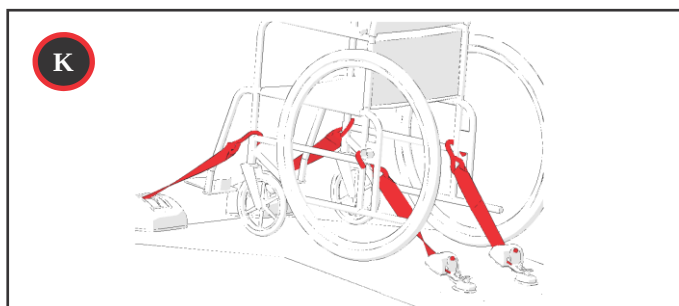



ROLSTOEL VASTZETTEN


8. Druk de Vergrendel knop in (3seconden) om de INQLINE™ gordels te vergrendelen (L).

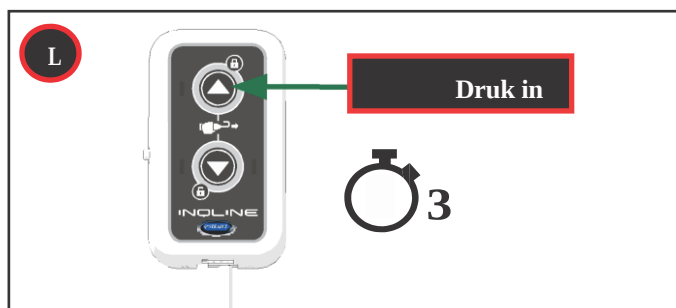


BEVEILIGEN PASSAGIER

!
 Dit veiligheidssysteem kan afwijken van wat wordt geïllustreerd, afhankelijk van het voertuigmodel.


9. Bevestig de heupgordel aan de Pin op de achterste retractor (M).

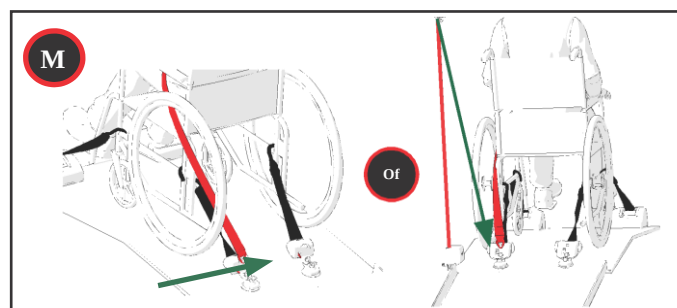

10. Bevestig de bekkengordel aan de pin op de andere achterste retractor (N).

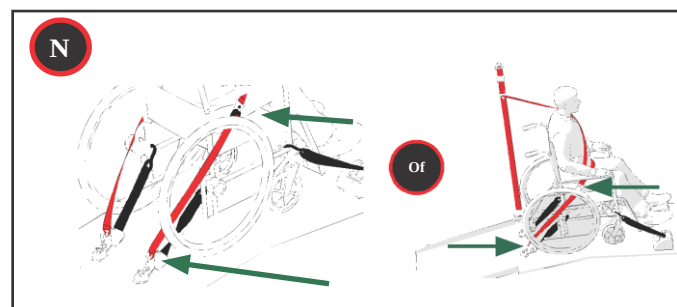

11. Bevestig de schoudergordel aan het daarvoor bestemde gordelpunt aan de wand van het voertuig (P).

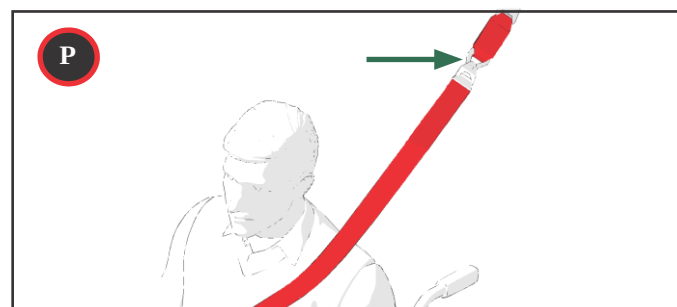

12. Trek de schoudergordel over de borst van de inzittende, bevestig de schoudergordel pinconnector aan de heupgordelpin en pas de lengte van de gordel aan. (Q).



GEBRUIKS INSTRUCTIES




BEVEILIGEN PASSAGIER



Heup- en schoudergordel moeten over de schouder en heup van de inzittende gaan en mogen niet van het lichaam worden weggehouden. Wij raden het gebruik van een bekken en schoudergordel samen aan en niet individueel. Dit kan de prestaties van het systeem in gevaar brengen. Zorg dat de schoudergordel niet in de nek van de inzittende schuurt.(R).



13. Zorg dat de sluiting op de heup van rolstoelinzittende zit, de rolstoel op de rem staat en het contact uit, klaar voor transport (S).

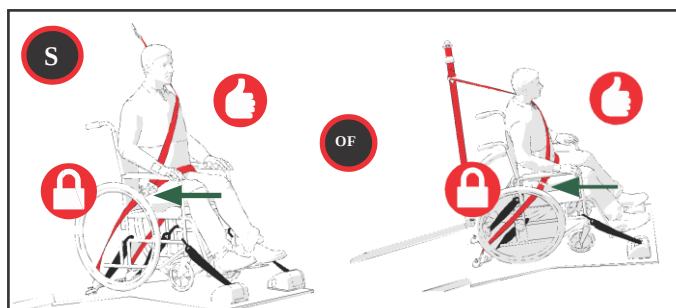


ONTGRENDELING PASSAGIER

14. Maak de connector van de schoudergordel los van de Schoudergordelspin (T).



15. Maak de Connector van de wandbevestiging los van de Schoudergordelspin (U) en berg de schoudergordel op.

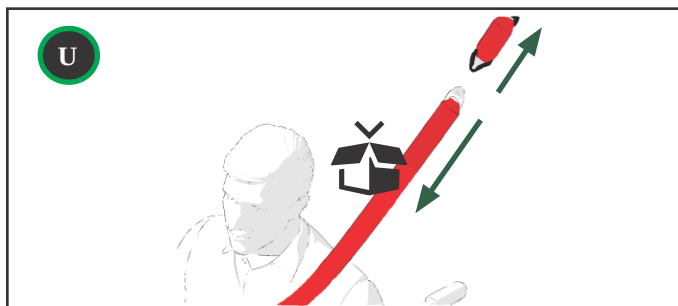

16. Ontgrendel de heupgordel van de bekkengordel (V).




GEBRUIKS INSTRUCTIES




ONTGREDELING PASSAGIER

17. Ontgrendel de bekkengordel van de retractorpin (W) en berg de bekkengordel op.

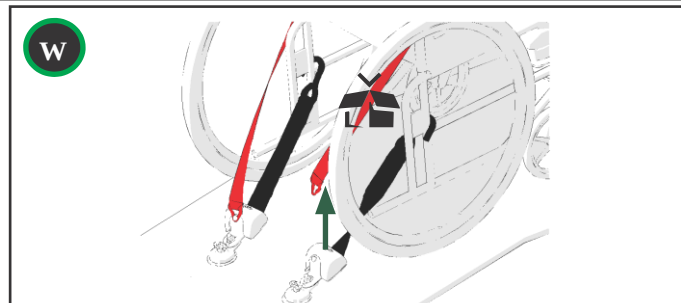


18. Ontgrendel de heupgordel van de retractorpin (X) berg de heupgordel op.

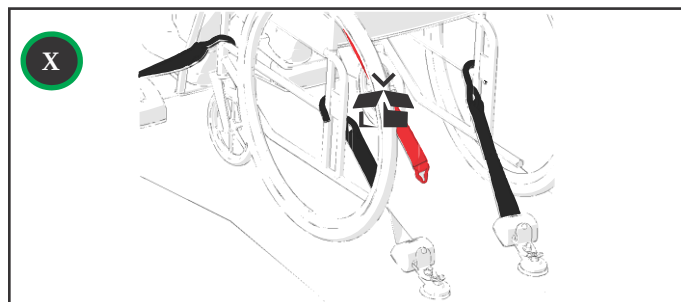


ONTGREDELING ROLSTOEL


19. Ontgrendel de remmen maar laat het contact uit (Y).

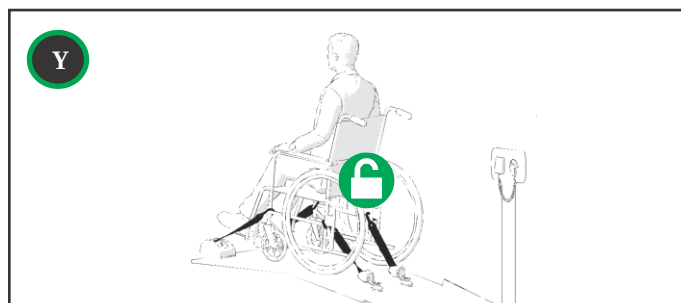

20. Druk de ontgrendel knop in en houdt deze vast (4 sec) om zo de retractoren/gordels te ontgrendelen (Z).

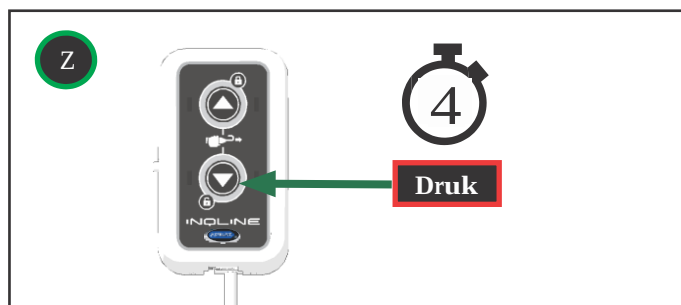


21. Druk de rode knop in en verwijder de gordelhaken (AA).

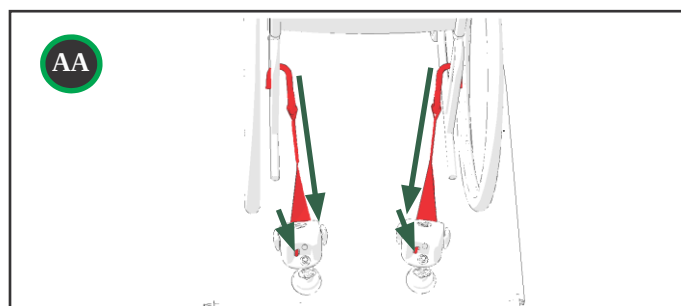




ONTGREDELING ROLSTOEL


22. Verwijder de achterste QRT retractoren van de vloer door de Slide 'N Click® op te tillen en weg te schuiven (**BB**). Berg de retractoren op.

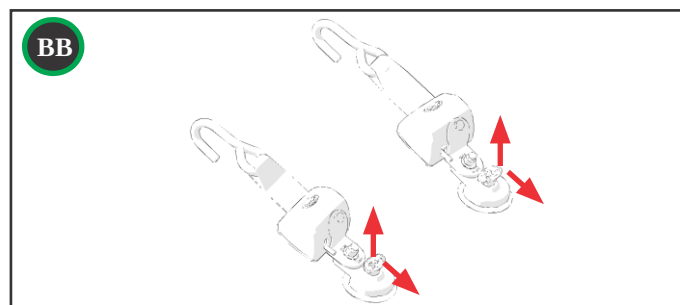


23. Druk op de Z-knop en houd deze ingedrukt; druk de joystick naar beneden om de rolstoel naar beneden te bewegen op de oprijplaat. **VOORZICHTIG**, beweeg hem een beetje naar links of naar rechts om de richting van de rolstoel aan te passen (**CC**).

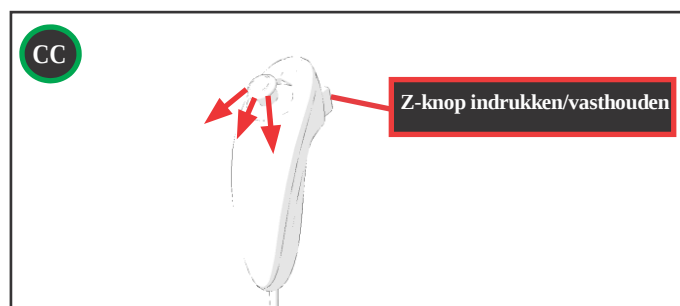


Wees **VOORZICHTIG** met het sturen van de rolstoel zodra deze zich op de oprijplaat bevindt. (**DD**).

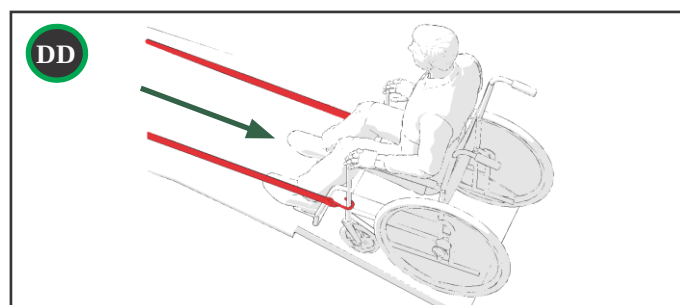

24. Plaats de rolstoel op de grond, laat de Z-knop los en berg hem op. Vergrendel de remmen van de rolstoel en houd de stoel uitgeschakeld (**EE**).

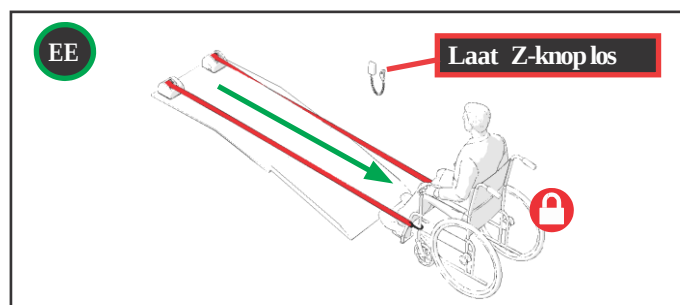


25. Houd beide knoppen (4 sec.) ingedrukt om de oprolmechanismen los te laten. Berg de gordelhaken netjes op, ontgrendel de remmen of zet het contact weer aan op de stoel. Plaats de rolstoel op een veilige plek (**FF**).

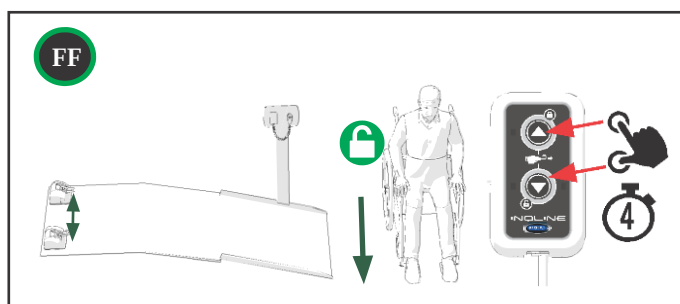


1. Ontgrendel de gordels van de rolstoelpassagier (GG).



2. Ontgrendel de heup- en bekkengordel van de gordelpinnen op de achterste retractoren (HH).

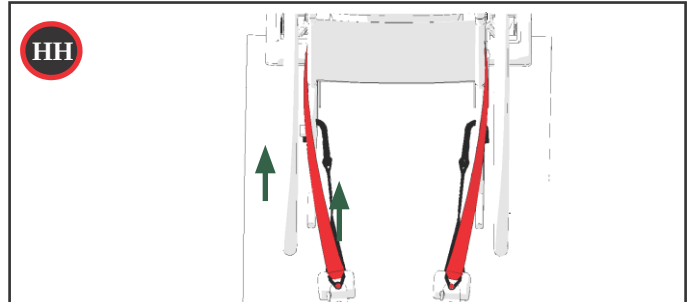


Gordel) laat de gordel niet los, maak dan de bekkengordel los van de retractorpin of snijdt de bekkengordel door onder een hoek. Om veiligheidsredenen raden wij het gebruik van de Q'Straint® Emergency Cutter aan om de banden onder een hoek (JJ) af te snijden. (Q'Straint® Emergency Cutter is apart verkrijgbaar).

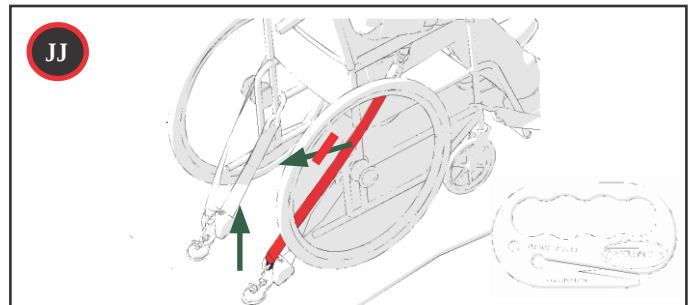


3. Druk de ontgrendel knop in en houdt deze vast (4 seconds) om zo de voorste INQLINE™ retractoren te ontgrendelen (KK)




Als de retractoren worden losgelaten, ga dan verder met stap 6.

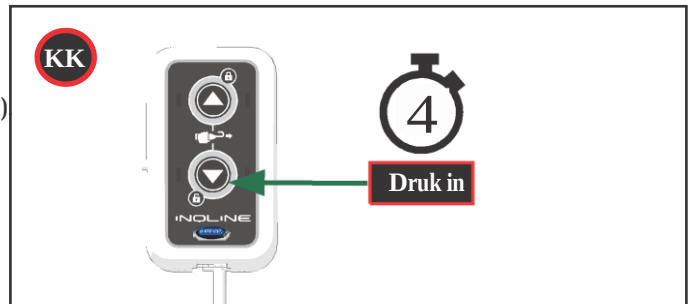


4. Als de voorste INQLINE™ retractoren NIET loslaten koppel dan het koord van de afstandsbediening met Joystick los om zo het wandbediening-paneel als hoofdbediening te gaan gebruiken (LL).

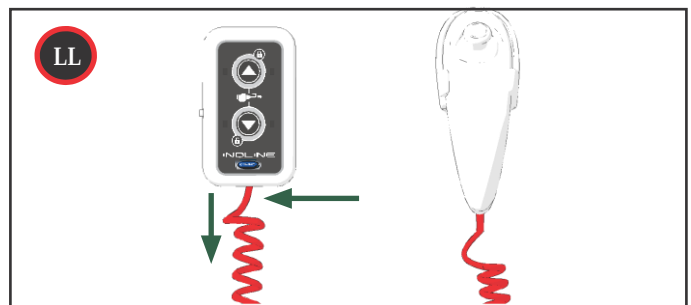


5. Druk vervolgens op de ontgrendelingsknop om de voorste retractoren te ontgrendelen en de rolstoel een paar centimeter terug te bewegen.(MM).

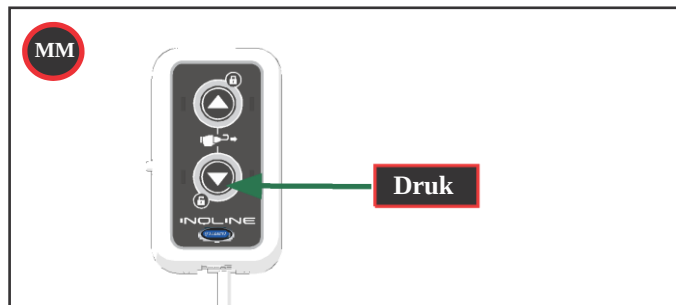


Als de voorste INQLINE™ retractoren **NIET** ontgrendelen, zorg er dan voor dat er iemand achter de rolstoel staat om hem op zijn plaats te houden, voordat u de voorste gordels schuin afsnijdt met de Q'Strain® Emergency Cutter (NN).

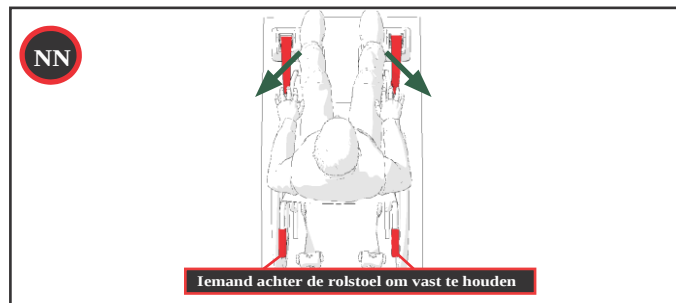


6. Druk de rode hendels in en verwijder de gordelhaken (PP).

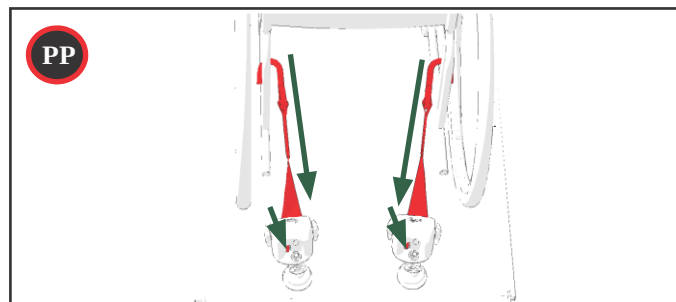


7. Verwijder de achterste QRT retractoren van de vloer door de Slide 'N Click® op te tillen en weg te schuiven (QQ).

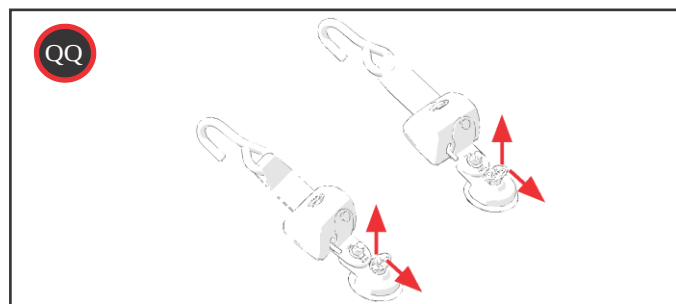


Als de voorste INQLINE™ gordels zijn afgesneden ga naar de volgende stap (RR). Als de gordels niet zijn afgesneden ga dan naar stap 9.

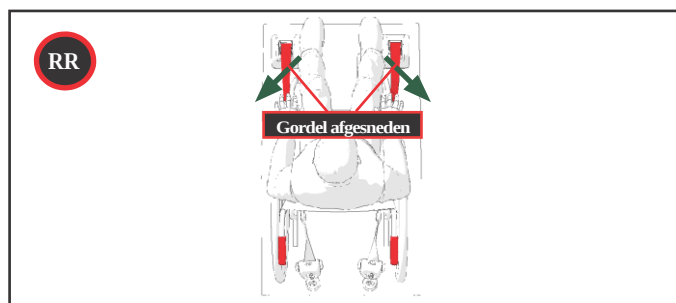


8. Ontgrendel de remmen of zet de rolstoel op contact. Rijdt en loop **VOORZICHTIG** als u nu de rolstoel handmatig van de oprijplaat laat rijden. Plaats de rolstoel op een veilige plek (SS).

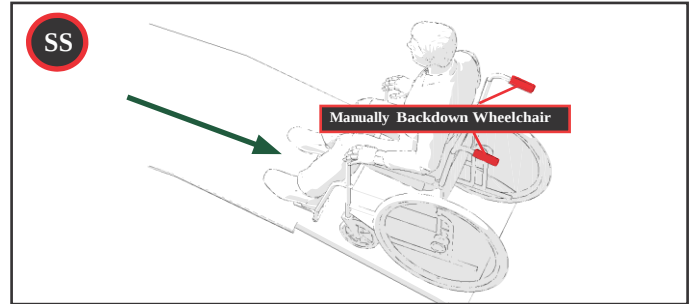


Als de voorste INQLINE™ gordels niet zijn doorgesneden ga dan naar de volgende stap (TT).

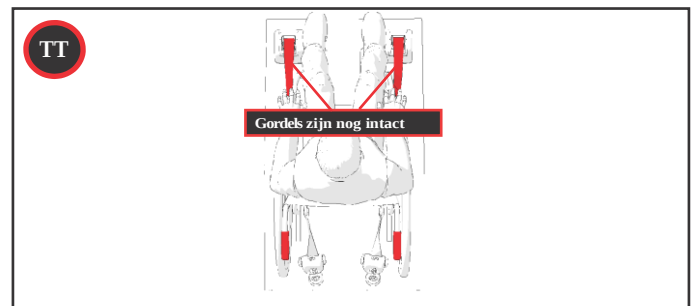


9. Ontgrendel de remmen en houd de stoel uitgeschakeld. Druk de Z-knop en houdt deze ingedrukt; druk de joystick naar beneden om de rolstoel met **VOORZICHTIG** naar beneden te bewegen en beweeg hem vervolgens iets naar links of rechts om de richting van de rolstoel aan te passen. (UU).

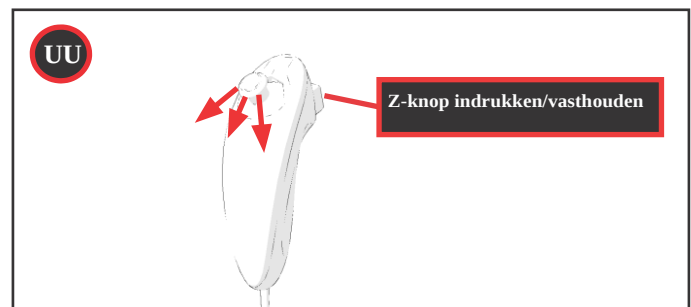

Stuur **VOORZICHTIG** zodra de rolstoel zich op de oprijplaat bevindt (VV).

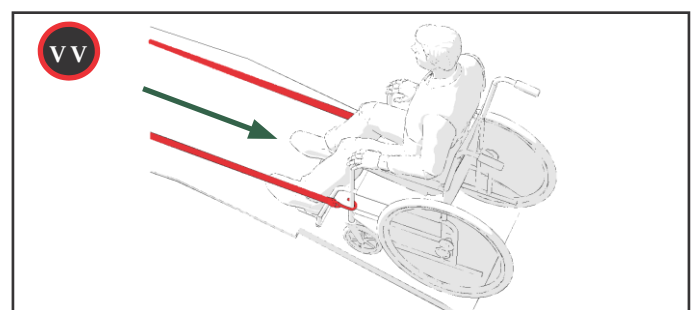


10. Plaats de rolstoel op de grond, laat de Z-knop los en berg hem op. Vergrendel de remmen van de rolstoel en houd de stoel uitgeschakeld (WW).

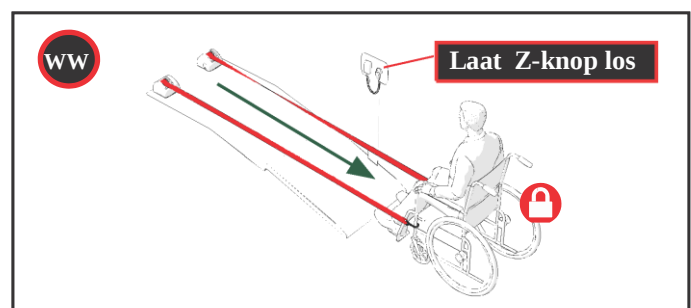


NOODONTGREDELING



11. Begeleid de gordelhaken voorzichtig terug, ontgrendel de remmen van de rolstoel en zet het contact weer aan. Plaats de rolstoel op een veilige plek (XX).

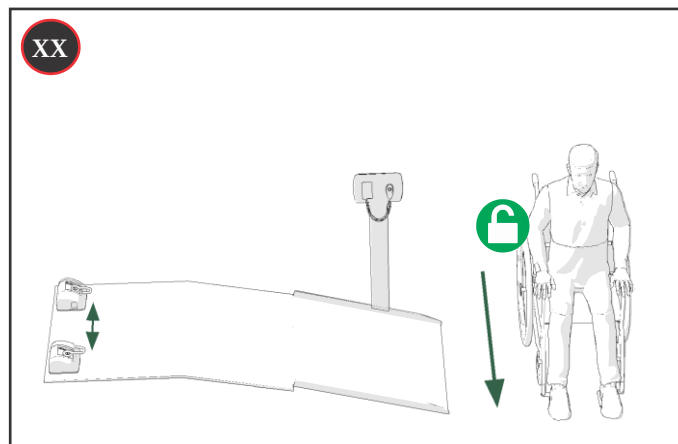



PROBLEEMOPLOSSEN

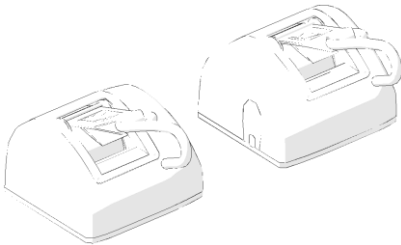PROBLEEM	BEELD	OPLOSSING
Voorste INQLINE™ retractoren werken niet.		Zorg ervoor dat ze van stroom zijn voorzien, dat alle draden zijn aangesloten en dat het vergrendelingscircuit goed werkt. Zorg er ook voor dat de accu van de auto niet minder dan 12 volt vermogen heeft.
Voorste INQLINE™ retractoren laten de gordelhaken niet los.		Houd beide knoppen op het wandbedieningspaneel ongeveer 4 seconden ingedrukt om gordelhaken los te laten.
De achterste retractoren geven de gordelhaken niet vrij.		Houd de ontgrendelingsknop ongeveer 10 seconden ingedrukt om de oprolmechanismen los te laten. Druk vervolgens op de rode hendels en maak de achterste gordelhaken los.

NOODONTGREDELING

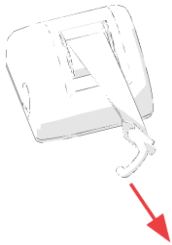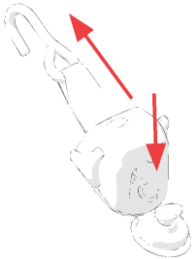
PROBLEEM	BEELD	OPLOSSING
De gordel is in het voorste oprolmechanisme gedraaid.		Houd beide knoppen ongeveer 4 seconden ingedrukt om de voorste oprolmechanismen los te laten. Trek vervolgens aan gordelhaken tot u een gedraaide band vindt en maak de band recht.
De gordel is in het achterste oprolmechanisme gedraaid.		Druk op de hendel en trek aan de gordelhaak tot u een gedraaide band vindt en maak de band recht.
De voorste oprolmechanismen werden vergrendeld voordat de rolstoel werd vastgezet.		Houd beide knoppen ongeveer 4 seconden ingedrukt om de voorste retractoren los te laten en ga dan verder.
Toen de ontgrendelingsknop werd ingedrukt, lieten de voorste oprolmechanismen niet los..		Druk op de Reset-knop (2 knipperende rode lampjes en 2 groene lampjes), druk de joystick naar beneden totdat de rolstoel een paar centimeter terugrijdt, stop en ga verder met de volgende stap.
De rolstoel stopte halverwege de oprijplaat omdat de voorste retractoren niet meer werken.		Druk op de Reset-knop en ga verder.

PROBLEEMOPLOSSEN

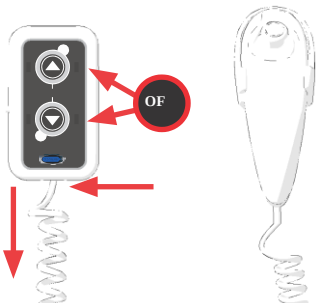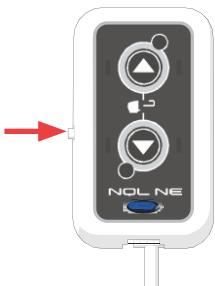PROBLEEM	BEELD	OPLOSSING
De joystick werkt niet.		Haal de stekker van het joystick controllerkoord uit het wandbedieningspaneel en gebruik de pijlen omhoog en omlaag om de rolstoel op en neer te bewegen op de oprijplaat. Bel de geautoriseerde dealer om de joystick te vervangen.
Het wandbedieningspaneel werkt niet.		Zorg ervoor dat het apparaat van stroom is voorzien (2 groene lampjes) zo niet, controleer op gebroken, losse of losgekoppelde kabels. Als het nog steeds niet werkt, neem dan contact op met een geautoriseerde dealer voor vervanging.
De Reset-knop werkt niet.		Bel een door Q'Straint® geautoriseerde dealer.
De LED-lampjes op het wandbedieningspaneel knipperen na uitgebreid gebruik van de joystick.		Druk op de Reset-knop aan de zijkant van het wandbedieningspaneel om het systeem te resetten.
In geval van stroomuitval:		Druk op de Reset-knop en kijk of de INQLINE™ voeding weer wordt ingeschakeld. Controleer ook de INQLINE™-zekering om er zeker van te zijn dat deze werkt. Als de zekering niet werkt, vervang deze dan.

NOODONTGREDELING

PROBLEEM	BEELD	OPLOSSING
In een Noodsituatie En de rolstoelvergrendeling is vergrendeld en laat de rolstoelpassagier niet los.		Ontgrendel de bekkengordel van de achterste retractor pin of snijd de gordel van de bekkengordel onder een hoek door. (gebruik hiervoor een Q'Straint® Emergency Cutter)
In een noodsituatie En de retractoren zijn vergrendeld en laten de gordelhaken niet los.		Druk op de knop Reset en druk op de joystick naar beneden. Als de retractoren de gordelhaken niet loslaten, snijdt u de banden schuin af (gebruik de Q'Straint® Emergency Cutter).
In een noodsituatie En er is geen stroom.		Snijdt u de banden schuin af (gebruik de Q'Straint® Emergency Cutter).
In een noodsituatie Kan de INQLINE retractoren niet vergrendelen terwijl u de vergrendelknop op het wandbedieningspaneel ingedrukt houdt.		Houd de Z-knop ingedrukt; trek de joystick naar beneden zodat de rolstoel zich terug kan bewegen van 1 tot 2 centimeter, stop en probeer opnieuw om de oprolmechanismen te vergrendelen.

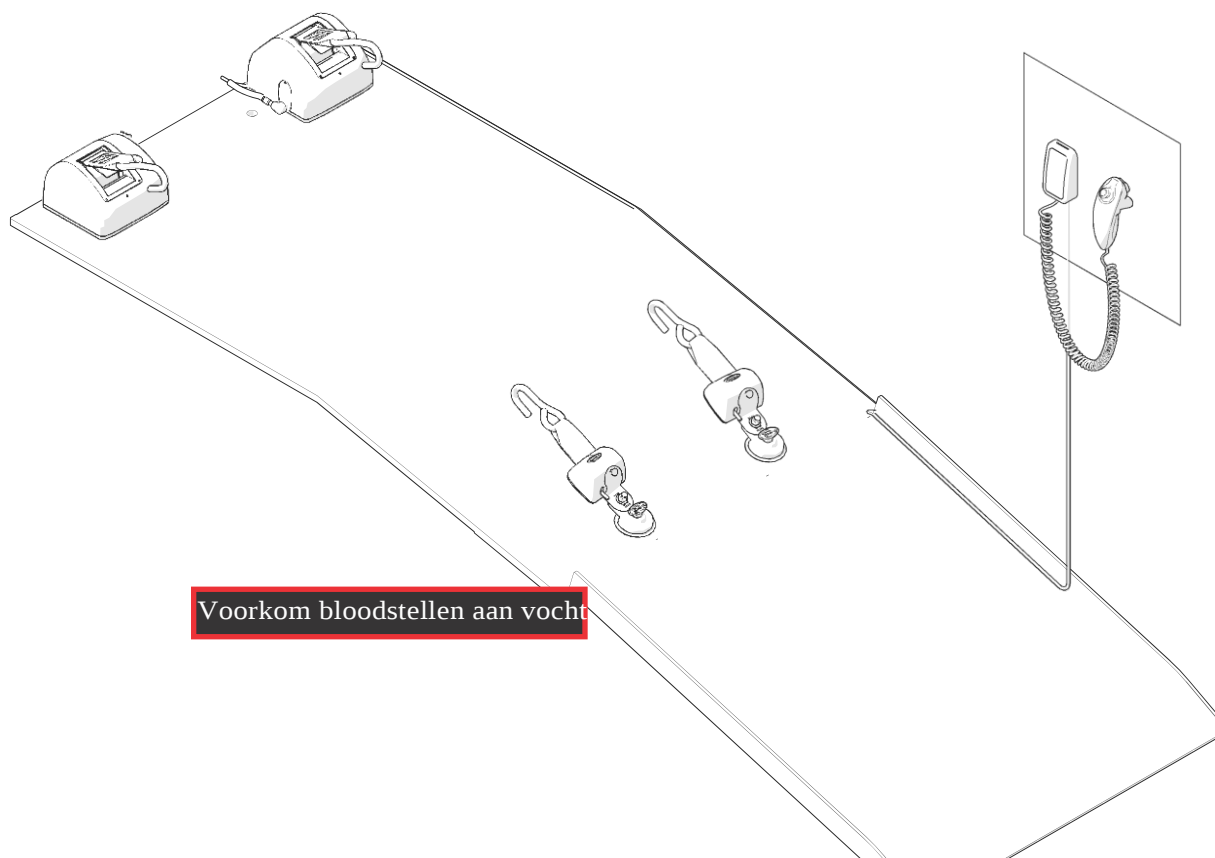

- Maak de retractoren NIET nat.
- Maak de joystick of het wandbedieningspaneel NIET nat.
- Controleer alle kabels, zorg ervoor dat ze aangesloten en afgedekt zijn.
- Controleer op uitgetrokken kabels.
- Houd rolstoelbanden altijd schoon en zorg ervoor dat ze langzaam weer in de opbergruimte worden opgeborgen als ze niet in gebruik zijn.
- Alle systemen en componenten moeten regelmatig worden geïnspecteerd, gereinigd en onderhouden.
 - o Reinig de banden regelmatig met milde zeep en water. Leg na het reinigen de band volledig uit (en leg ze uit, om te voorkomen dat er water in de oprolmechanismen terechtkomt) tot ze volledig droog zijn.
 - o Reinig de schroefdraad van de bouten en breng opnieuw locktight aan als de bouten zijn afgesteld.
- Zorg ervoor dat u beschadiging van het bandweefsel voorkomt door het uit de buurt te houden van poetsmiddelen, oliën of andere chemicaliën.(met name accuzuur).
- Gerafelde, verontreinigde of beschadigde banden moeten worden vervangen.
- Gebroken en versleten onderdelen moeten worden vervangen.

⚠ Vervang systemen of onderdelen (met inbegrip van vloer- en wandverankeringen) die tijdens een aanrijding van een voertuig zijn gebruikt.

GARANTIEREGISTRATIE

Om ten volle te profiteren van de garantie van Q'Straint, registreert u uw product online op: www.qstraint.com/registration
MAILT U ALSTUBLIEFT DEZE REGISTRATIE NIET. Voordat u online gaat, moet u de registratie van uw voertuig bij de hand hebben, evenals de uitrusting:

Serienummer # _____ Onderdel # _____

Q'STRAIN'T'S LIMITED GARANTIE: Q'Straint® garandeert dat dit product voldoet aan onze productiespecificaties en vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Q'Straint® of zijn geautoriseerde dealer zal (naar eigen goeddunken) de defecte component(en) gratis repareren of vervangen. Deze garantie dekt niet de kosten van montage of demontage, transport, arbeidsloon of andere bijkomende kosten voor het verwijderen van een defect onderdeel of de installatie van het vervangende onderdeel.

Q'Straint® of zijn geautoriseerde dealers behouden zich het recht voor het product te inspecteren om te controleren of het beweerde defect niet is veroorzaakt door niet-Q'Straint® goedgekeurd onderhoud of door vreemde deeltjes of stoffen. Deze garantie is niet van toepassing op defecten die het gevolg zijn van een ongeval, verkeerd gebruik of misbruik, opzettelijke schade, brand, overstroming, wijziging of aanpassing van het product, nalatigheid, blootstelling of gebruik van het product op een manier die niet overeenkomt met het beoogde gebruik.



www.qstraint.com

Deze handleiding bevat de meest recente informatie op het moment van afdrukken. Q'STRAIT® behoudt zich het recht voor om systemen, componenten en inhoud zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



Deze handleiding is afgedrukt op een 30% post-consumptievoorraad met inkt op basis van plantaardige olie en is 100% recycleerbaar.

© 2017 Q'STRAIT®. All Rights Reserved.

Onze producten zijn beschermd onder de volgende patenten: www.qstraint.com/patents



VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING OF OM U LOCALE DEALER TE VINDEN:

Q'STRAIT EUROPE
72-76 John Wilson Business Park
Whitstable, Kent, CT5 3QT
United Kingdom
Tel: +44 (0)1227 773035
Fax: +44 (0)1227 770035
Email: info@qstraint.co.uk

Q'STRAIT AMERICA
4031 NE 12th Terrace
Oakland Park, FL 33334
Tel: 800-987-9987
Fax: 954-986-0021
Email: qstraint@qstraint.com

Q'STRAIT AUSTRALIA
Tramanco Pty Ltd.
21 Shoebury Street,
Rocklea, Australia, QLD. 4106
Tel: +61 7 3892 2311
Fax: +61 7 3892 1819
Email: info@tramanco.com.au